



sanedia
naturalmente

SANESHIELD

VISIERA - FACE SHIELD

INDICE

1. Fabbricante	2
2. Destinazione d'uso	2
3. Prestazioni e Marcatura	2
4. Confezione di vendita	3
5. Istruzioni di montaggio.....	3
6. Manutenzione	3
7. Avvertenze	3
8. Stoccaggio e trasporto	4
9. Dati del Produttore e dell'Organismo Notificato	4



**Istruzioni originali
per uso e manutenzione**

1. Fabbricante

Il dispositivo **Visiera SANESHIELD** è immesso in commercio da:

SANEDIA SRL

Via O. Rinuccini, 40
50144 Firenze (FI)
P.IVA e C.F.: 05932510489

che si configura come il fabbricante del presente Dispositivo di Protezione Individuale (DPI).

La dichiarazione di conformità del DPI secondo il Reg. (UE) 425/2016 nonché la norma tecnica UNI EN 166:2004 è disponibile sul sito www.sanedia.com

2. Destinazione d'uso

Il presente DPI si configura come un DPI di II Categoria, conforme alla norma UNI EN 166:2004 relativamente ai requisiti generali ed al requisito specifico "protezione contro goccioline e spruzzi di liquidi".

L'utilizzo di questo DPI è previsto per quelle situazioni lavorative e/o domestiche per le quali l'utilizzatore necessita di proteggere gli occhi ed il viso da goccioline e spruzzi di liquidi.

3. Prestazioni e Marcatura

Il dispositivo è stato testato, nella sua interezza e/o nelle sue componenti, secondo i seguenti requisiti relativi alla norma tecnica UNI EN 166:2004:

- campo visivo;
- caratteristiche fascia girotesta;
- qualità del materiale e della superficie;
- poteri rifrattivi sferico, astigmatico e prismatico;
- fattore di trasmissione;
- robustezza incrementata;
- resistenza alla accensione;
- stabilità alla temperatura;
- diffusione della luce;
- protezione contro goccioline e spruzzi di liquidi;
- resistenza all'invecchiamento.

Tutte le prove di laboratorio hanno dato esito conforme.

Pertanto, alla luce dei risultati dei succitati test, il dispositivo è marcato riportando le seguenti indicazioni:

S 1 S - EN166 3 S 

Le stesse rappresentano:

- . **S**: indicazione del fabbricante SANEDIA SRL
- . **1**: classe ottica
- . **S**: robustezza incrementata - oculare
- . **EN166**: norma tecnica di riferimento
- . **3**: simbolo per i liquidi
- . **S**: robustezza incrementata - frame.

In base al requisito particolare a cui il DPI risulta conforme, ovvero "protezione contro goccioline e spruzzi di liquidi", la Visiera SANESHIELD garantisce la copertura della regione degli occhi da goccioline spruzzi (requisito verificato con laser secondo UNI EN 168:2001 10.2.3, con testa inclinata verticalmente e+ e - 45°).

Allineandosi alla prescrizione specifica per le visiere del requisito 7.2.4 della suddetta norma tecnica, inoltre, la Visiera SANESHIELD presenta una profondità della linea mediana verticale di 180mm (minimo accettabile = 150mm).

Se utilizzato e mantenuto nelle corrette condizioni, la vita utile del dispositivo è di **18 mesi**.

Fissata direttamente tramite bardatura al capo, la visiera rappresenta una protezione parziale non solo per gli occhi ma per tutto il volto dalle schegge, dalle sostanze chimiche o radiazioni, da schizzi, droplets e fluidi organici, fornendo una barriera fisico/meccanica che si pone davanti al viso dell'utilizzatore.

Essendo conforme ai requisiti definiti dalla norma tecnica UN EN 166:2004, il presente DPI **non è utilizzabile per la protezione da radiazioni nucleari, dei raggi X, dei fasci laser e delle radiazioni infrarosse (IR) a bassa temperatura emesse da sorgenti a bassa temperatura.**

Non rientra nei protettori dell'occhio per i quali esistono norme separate e complete, come i protettori dell'occhio contro i raggi laser, gli occhiali da sole per uso generale, ecc.

Non adatto come attrezzatura di protezione degli occhi e del viso per saldatura e tecniche connesse, i cui requisiti sono contenuti nella norma EN 175.

Non adatto a protettori dell'occhio dotati di lenti soggette a prescrizione medica.

N.B. Nel caso sia richiesta protezione contro le particelle ad alta velocità e temperature estreme, il protettore dell'occhio prescelto dovrebbe essere marcato con la lettera T immediatamente dopo la lettera di impatto (cioè FT, BT o AT). Se la lettera di impatto non è seguita dalla lettera T, il protettore dell'occhio deve essere utilizzato solo contro le particelle ad alta velocità a temperatura ambiente.

4. Confezione di vendita

La Visiera SANESHIELD è commercializzata in due differenti formati di imballaggio con le seguenti dimensioni e codici identificativi:

- scatola 35x27x5 cm contenete 2 Visiere SANESHIELD.
La confezione è identificata da codice a barre EAN 8052780660136.
- scatola 35x27x50cm contenete 20 Visiere SANESHIELD.
La confezione è identificata da codice a barre EAN 8052780660143.

In entrambi i casi ogni Visiera SANESHIELD è a sua volta contenuta in un sacchetto di plastica termosaldato.

In ogni sacchetto termosaldato sono presenti i seguenti componenti:

- 1 schermo frontale in plastica **PET** a cui è stata incollata una fascia di **schiuma poliuretanic**a a media densità e con trattamento anti-batterico e sono stati inseriti due rivetti in plastica PA da utilizzare per collegare la fascia elastica allo schermo frontale.
- 1 fascia girotesta di tessuto elasticizzato;
- 1 Manuale d'Uso.

5. Istruzioni di montaggio

Per il montaggio della Visiera SANESHIELD seguire i seguenti passaggi:

- 1) aprire la scatola di imballaggio ed estrarre uno dei sacchetti termosaldati contenete 1 Visiera SANESHIELD;
- 2) aprire il sacchetto ed estrarre tutti i pezzi in esso contenuti assicurandosi che siano presenti:
 - 1 schermo e relativa fascia di schiuma poliuretanic
 - 1 fascia elastica;

Controllare che nessuno dei componenti presenti danni, crepe o altri difetti superficiali.

- 3) in base alla circonferenza del cranio, valutare a livello di quale foro della fascia elastica debba essere inserito al rivetto presente su un lato dello schermo;
- 4) ripetere l'operazione del punto 3) sull'altro lato dello schermo;
- 5) la Visiera SANESHIELD è ora pronta ad essere utilizzata.

6. Manutenzione

La visiera SANESHIELD non richiede alcuna manutenzione.

Nel caso in cui urti o graffi abbiano danneggiato la visiera compromettendo la capacità di visione sarà necessario procedere alla sua sostituzione.

Nel caso sia necessario pulire la visiera utilizzare acqua e un detergente di uso domestico.

ATTENZIONE: non usare prodotti a base alcool o solventi in quanto potrebbero danneggiare la parte di schiuma poliuretanic

o lo schermo stesso, compromettendone la funzionalità.

In caso di rottura della Visiera SANESHIELD, o di una delle sue parti, il dispositivo dovrà essere smaltito e sostituito.

Non effettuare alcun tipo di sostituzione pezzi, se non contemplata nel presente Manuale d'Uso.

7. Avvertenze

Conservare il manuale d'uso allegato al dispositivo.

Non esporre a fonti di calore dirette.

Non utilizzare prodotti a base alcool o solvente per pulire la visiera in quanto potrebbero danneggiare la schiuma poliuretanic

I materiali che possono venire a contatto con la pelle potrebbero causare reazioni allergiche ai soggetti sensibili; non indossare se è nota la sensibilità dell'utilizzatore ad uno o più dei materiali utilizzati.

Non utilizzare lo schermo in caso di graffi o danni, ma provvedere a smaltirlo e sostituirlo.

I protettori dell'occhio contro le particelle ad alte velocità indossati sopra occhiali oftalmici di riferimento possono trasmettere impatti, generando un pericolo per il portatore.

8. Stoccaggio e trasporto

Il dispositivo viene imballato in sacchetti di plastica e successivamente posto in apposite scatole.

Maneggiare le confezioni di imballaggio con cura, evitando urti che potrebbero danneggiare il dispositivo, nonché l'esposizione diretta a fonti di calore o di umidità.

La Visiera SANESHIELD dovrà sempre essere riposta in un alloggiamento chiuso o inserita nell'imballaggio plastico fornito dal fabbricante.

In caso di trasporto il DPI dovrà essere adeguatamente imballato in una scatola di cartone, contenente due visiere, di dimensione 36x28x5 cm.

9. Dati del Produttore e dell'Organismo Notificato

SANESHIELD è prodotto in Italia da SANEDIA SRL, per qualsiasi informazioni sul prodotto si prega di prendere contatto con l'azienda ai seguenti recapiti:

SANEDIA SRL
Via Rinuccini 40 – 50144 FIRENZE
www.sanedia.com – mail : info@sanedia.com

L'Organismo Notificato preposto alla verifica e certificazione della macatura CE della Visiera SANESHIELD come DPI di II categoria è :

ITALCERT Srl
Organismo Notificato nr. 0426
Viale Sarca, 336
20126 Milano (MI)

Distributore:

SANEDIA S.R.L.
Via O. Rinuccini, 40
50144 Firenze (FI)
Mail: info@sanedia.com
www.sanedia.com

Dispositivo Protezione Individuale

UNI EN 166:2004 Cat. II

SANESHIELD
VISIERA - FACE SHIELD



Tabella Revisioni

Revisione	Data	Note
0.0	04/08/2020	Prima Edizione